

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

スマイルコンタクトファインフィットプラス

コンタクトレンズ装着液

第3類医薬品

レンズ装着時、直接1～3滴つけるだけ

ゴロゴロ感を抑え、瞳にスツとなじんで、レンズ装着を容易にする
瞳への親和性を高める[コンドロイチン硫酸エステルナトリウム]配合

— スマイルコンタクトファインフィットプラスの特徴 —

全ての
コンタクトレンズに
使えます。

2 瞳になじみやすく、
優れた装着感を実現

瞳への親和性を高める高分子
[コンドロイチン硫酸エステルナトリウム]配合

1 全てのコンタクトレンズでスムーズな装着が実現

3種の高分子クッション成分の働きで、レンズのゴロゴロ感や
異物感を軽減し、装着を容易にします。

3 高保水性高分子が
レンズの乾燥を防止

4 タンパク汚れを抑え、
レンズのくもりを防止

— コンタクトレンズ

角膜

レンズと瞳の間
クッション作用

△ 使用上の注意

■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみ、痛み

● 効能


ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズの装着を容易にします

● 用法・用量

コンタクトレンズの両面を本剤1～3滴でぬらしたのち装着してください

- ① レンズに直接、液をつける。
- ② そのままレンズを瞳に装着する。

※装着後、液が目から溢れた場合には、清潔なガーゼで軽くふき取ってください。
成分の結晶が目周りに付着することがあります。

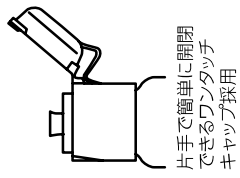

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をコンタクトレンズや指に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやほり等)の原因になります)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 本剤を用いてコンタクトレンズを装着した後に、点眼薬を使用する場合は、30分以上あけてご使用ください。

● 成分 (100mL中)

有 効 成 分	含 量
ヒプロメロース	1.0g
ポリビニルアルコール(部分ケン化物)	2.0g
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.05g
ヒアスパラギン酸カリウム	0.1g
タウリン	1.0g

*添加物として、トロメタモール、エデト酸Na、シクロデキストリン、塩化ベンザルコニウム、ポリソルベート80、グリセリン、pH調整剤を含む。

● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 開封後、容器の保存状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。
- (6) 使用期限(外箱に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。

【コンタクトレンズご使用の際の注意】・コンタクトレンズを取り扱う前に、よく手を洗い清潔にしてください。・コンタクトレンズを清潔に、また、正常に保つために保存、洗浄については十分に心がけてください。・コンタクトレンズご使用の方は、眼科医による定期検査を必ずお受けください。

■ お問合せ先

お買い求めのお店又は下記にお問合せください
ライオン株式会社
ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-7521** 〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

0123